



ViXion01専用スマートフォンアプリガイド

1. スマートフォンアプリ ViXion01の概要
2. インストール方法
3. 通信機能の有効化とViXion01との接続方法
4. ※本アプリ使用時の注意事項※
5. 本アプリの画面について
6. 別名を付ける機能について
7. ユーザー登録について

1. スマートフォンアプリ ViXion01の概要

概要

スマートフォンアプリ ViXion01（以下「本アプリ」）は、オートフォーカスアイウェア「ViXion01」とBluetoothで接続し、情報の表示や制御を行うためのものです。

はじめに

- 本アプリは「ViXion01」製品本体とBluetoothで接続して使用します
- 「ViXion01」の通信機能を有効にしてご使用ください

主な機能

- 「ViXion01」とBluetoothで接続（※本体の通信機能の有効化が必要です）
- キャリブレーションスライダーの操作により、「ViXion01」のレンズの度数を調節
- 左右のレンズ度数は、連動して、または別々に調節可能
- キャリブレーション値は最大3セットまで登録可能
- 「オートフォーカスモード」と「マニュアルモード」の切り替えが可能
- 対象物までの距離とレンズの度数、温度・照度・電池残量などの情報をリアルタイムに表示可能

2. インストール方法

方法①

QRコードをスキャンしてインストールする方法

1. カメラアプリを開く
2. 右図のQRコードにカメラを向ける
3. Android、iOS、またはタブレットに表示される通知をタップ
4. 画面の指示に従ってインストールを行う
5. インストール完了後、ホーム画面にアプリアイコンが表示される
(右図参照)

iOS




Android



方法②

App StoreまたはGoogle Playからインストールする方法

1. 「App Store」又は「Google Play ストア」アプリを開く
2. 「検索」タブをタップ
3. キーワード（ViXion01）を入力して検索
4. アプリの「入手」ボタンをタップ
5. アプリをインストール
6. インストール完了後、ホーム画面にアプリアイコンが表示される
(右図参照)

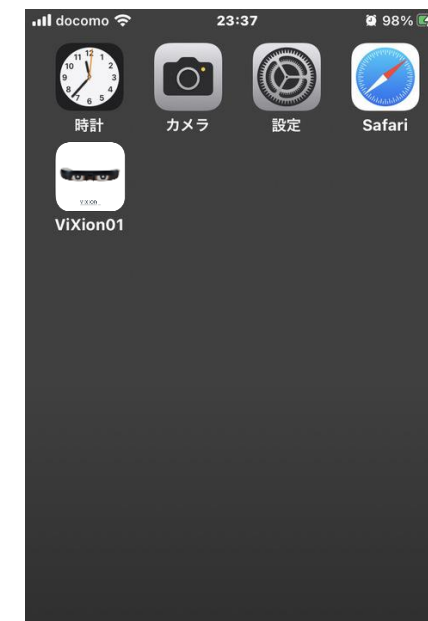

3. 通信機能の有効化とViXion01との接続方法

- 本アプリのご使用前に、ViXion01本体の①通信機能の有効化、および②本アプリとの接続が必要です

①通信機能の有効化

- 「ViXion01」は通信機能が無効な状態で出荷されます
- 通信機能を有効にするには、「右ボタンを押しながら、（右側つるを開いて）電源ON」を行ってください



②本アプリとの接続



- 通信機能の有効中は、右ランプが青く点滅することがあります。これは「ViXion01」がBluetooth接続待機状態であることを示しています
- 「ViXion01」がBluetooth接続待機状態の間は、本アプリケーションから検出することができます
- デバイス検索画面に表示された「接続」ボタンを押すことによって、検出された「ViXion01」と本アプリが接続されます
- Bluetooth接続待機状態は、1) 電源投入時、2) スマートフォンとの接続が切断されたときに開始されます
- Bluetooth接続待機状態は開始から一定時間が経過すると自動的に停止し、「ViXion01」は本アプリケーションから検出されなくなります

4. ※本アプリ使用時の注意事項※

- 通信機能を有効にする場合、他人のスマートフォン等からご自身の「ViXion01」へアクセスされる可能性があります。
通信機能を有効にして使用する場合は、周囲の状況を確認し、十分に気をつけてご使用ください
- 本アプリには、「ViXion01」本体に“別名を付ける機能”がありますので、ぜひご活用ください（本資料の後段で機能ご紹介）

5. 本アプリの画面について (1/2)

- 本アプリは、デバイス検索画面・メイン画面・設定画面から構成されます

デバイス検索画面



メイン画面



- ① ViXion01の名称
- ② ViXion01との通信切断 ※デバイス検索画面に戻る
- ③ 設定画面
- ④ 温度 (参考値)
- ⑤ 照度 (参考値)
- ⑥ 電池残量
- ⑦ 「オートフォーカスモード」への切替
- ⑧ 「マニュアルモード」への切替
- ⑨ 距離
- ⑩ 左レンズの度数 (参考値)
- ⑪ 右レンズの度数 (参考値)
- ⑫ 右レンズ・カリブレーションスライダー
- ⑬ 左レンズ・カリブレーションスライダー
- ⑭ 左/右カリブレーションを連動または別々に調節
- ⑮ カリブレーション/微調整
- ⑯ カリブレーション値の保存
- ⑰ カリブレーション値の読み込み
- ⑱ カリブレーション値の登録ボタン

設定画面



5. 本アプリの画面について (2/2)

- 本アプリの機能と画面操作は以下のように対応します

▼メイン画面 (再掲)



- ① ViXion01の名称
- ② ViXion01との通信切断 ※デバイス検索画面に戻る
- ③ 設定画面
- ④ 温度 (参考値)
- ⑤ 照度 (参考値)
- ⑥ 電池残量
- ⑦ 「オートフォーカスモード」への切替
- ⑧ 「マニュアルモード」への切替
- ⑨ 距離
- ⑩ 左レンズの度数 (参考値)
- ⑪ 右レンズの度数 (参考値)
- ⑫ 右レンズ・キャリブレーションスライダー
- ⑬ 左レンズ・キャリブレーションスライダー
- ⑭ 左/右キャリブレーションを連動または別々に調節
- ⑮ キャリブレーション/微調整
- ⑯ キャリブレーション値の保存
- ⑰ キャリブレーション値の読込
- ⑱ キャリブレーション値の登録ボタン

▼本アプリの主な機能と画面操作


- キャリブレーションスライダーの操作により、「ViXion01」のレンズの度数を調節
➡ ⑫⑬のキャリブレーションスライダー、⑮のボタンでキャリブレーション値を変更
- 左右のレンズ度数は、連動して、または別々に調節可能
➡ ⑭のボタンで、連動または別々に調節を切替
- キャリブレーションの設定値は最大3セットまで保存可能
➡ ⑯のボタンで保存、⑰のボタンで読込、⑱で3つの登録ボタンのどれを使用するかを選択
- 「オートフォーカスモード」と「マニュアルモード」の切り替えが可能
➡ ⑦のボタンでオートフォーカスモード、⑧のボタンでマニュアルモードに切替
- 対象物までの距離とレンズの度数、温度・照度・電池残量などの情報をリアルタイムに表示可能
➡ ⑩⑪が度数 (参考値)、④⑤⑥が温度・照度・電池残量を表示

なお、ViXion01に別名を付ける機能は、③のボタン押下で遷移する「設定画面」にて行うことができます (次ページ参照)

6. 別名を付ける機能について

- アプリにはデバイス検索画面に表示される「ViXion01」製品本体に別名を付ける機能があります
- この別名は設定したアプリのみで有効で、他のスマートフォンのアプリ上では反映されません。よく使用する「ViXion01」を素早く識別したい時に便利です


①デフォルトの名称は「ViXion01」

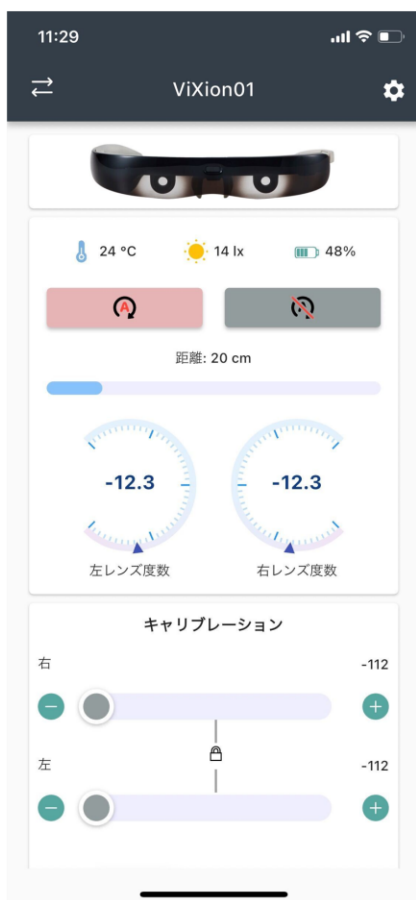

②設定画面で「ViXion X」に変更



③デバイス検索画面およびメイン画面で別名の「ViXion X」と表示

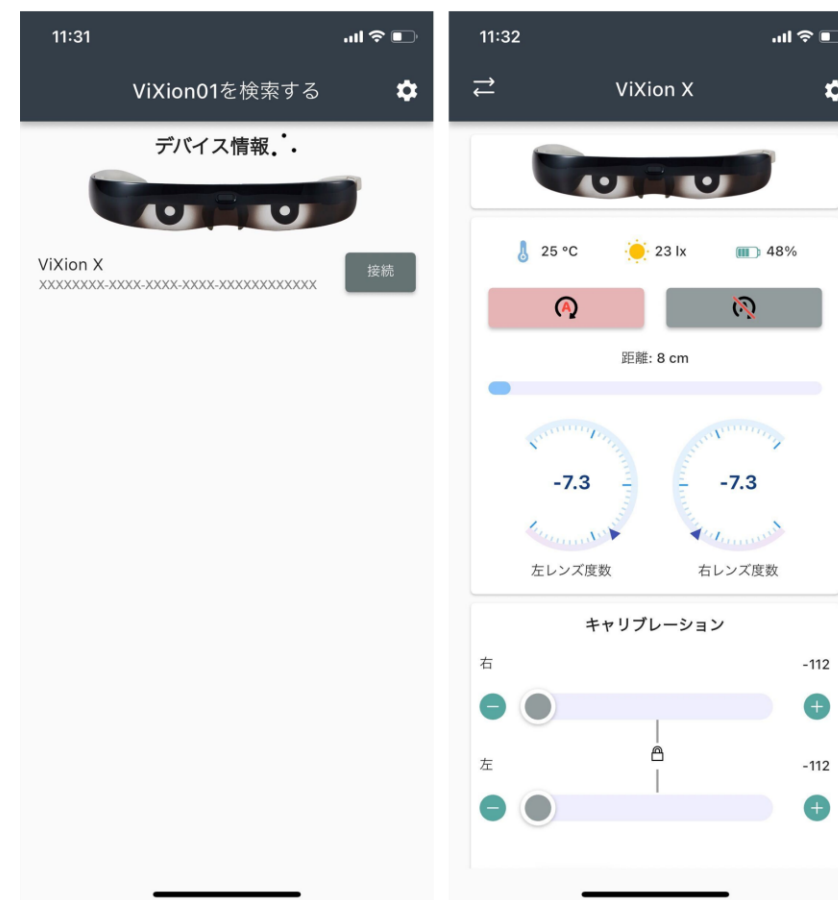

7. ユーザー登録について (1/2)

- 設定画面からユーザー登録フォームにアクセス可能です (製品に同梱されている製品保証書のQRコードからもアクセス可能です)
- 必要項目を入力し、ユーザー登録を行ってください


①設定画面のユーザー登録ボタンを押下




②ユーザー登録フォームに遷移後、必要な項目を入力



③「入力内容を確認」ボタンを押下し、問題なければ「登録するを押下」

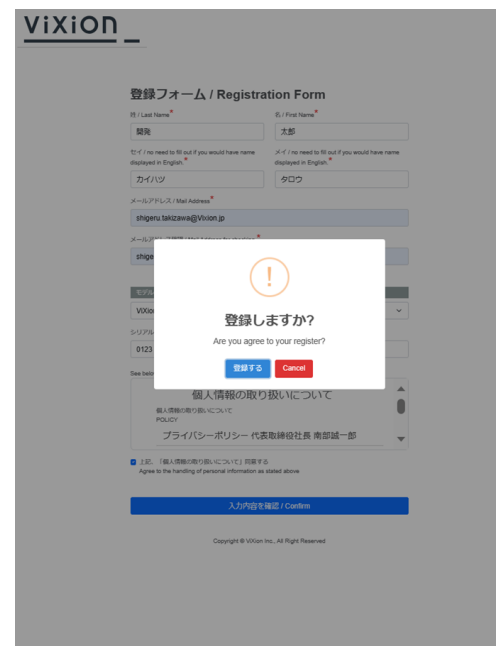

④「OKボタン」を押下

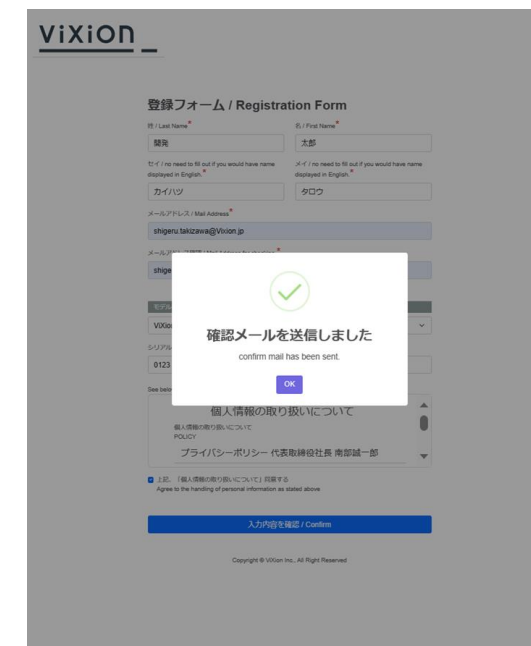

7. ユーザー登録について (2/2)

- 設定画面からユーザー登録フォームにアクセス可能です（製品に同梱されている製品保証書のQRコードからもアクセス可能です）
- 必要項目を入力し、ユーザー登録を行ってください

⑤登録したメールアドレス宛のメールを確認

【ViXion株式会社 確認メール】

今回は仮登録ありがとうございます。
このメールは、弊社から送信されており、メールアドレスの存在を確認するためのものです。
以下のリンクをクリックして、メールアドレスが有効であることを確認してください。

<https://support.vixion.jp/checkcode/activate/xxxxxx>

この確認を行うことで、本登録へ移行します。リンクの有効期限は20XX-XX-XX XX:XX:XX
までですので、お早めに確認手続きを行ってください。

安全な通信の確保のため、メールアドレスの確認をお願いしております。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

⑥本登録完了

ViXion

本登録完了 / Registration Completed

ViXion株式会社の本登録が完了しました。この度はご登録いただき、誠にありがとうございます。これにより、ViXion株式会社のサービスをご利用いただけるようになりました。今後とも、ViXion株式会社をよろしくお願いいたします。

Registration for ViXion Inc. has been completed. Thank you very much for registering with us. You can now use the services provided by ViXion Inc. We look forward to working with you in the future.

Copyright © ViXion Inc., All Right Reserved

ViXion _