

ViXion 01

スタートアップガイド


禁止事項

- ❌ ViXion01をかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。
- ❌ 早い動作をする時やスポーツ等では使用しないでください。
- ❌ 本体は防水ではありません。水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。（防滴：IPX3）
- ❌ 眼鏡の超音波洗浄機で洗浄しないでください。故障と感電のリスクがあります。


注意事項

- ⚠ 本体に化粧品や化学薬品がついた際は、付属のクロス又は、乾いた布でふき取ってください。
- ⚠ レンズが汚れた際は、乾いた綿棒などで軽く拭いてください。
- ⚠ 充電には付属のケーブル（USB Type-C）をご使用ください。
- ⚠ 異常を感じた時は、顔から外してツルを折りたたみ、電源をオフにしてください。


装着イメージ

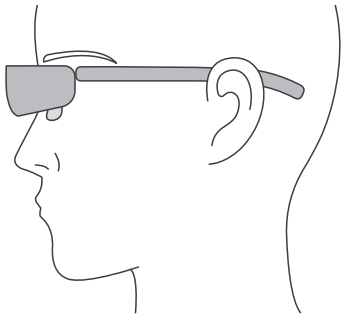

左側

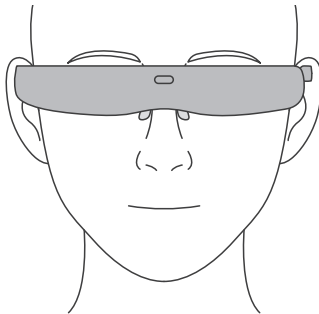


正面

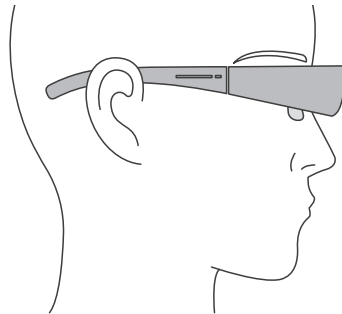

右側

■ ご使用前の準備

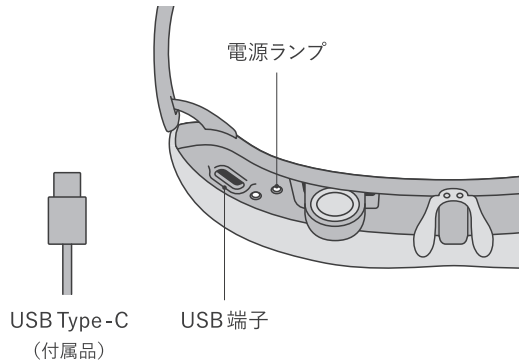

1 充電


本体のUSB 端子に付属品の USB Type-C コードを差し、電源ランプの青色が消灯したら充電完了です。

- 充電時間 約3時間
- 使用時間 約8時間 ～ 約10時間
- 電池残量に応じて電源ランプの色が変化します。

残量大  = 緑

残量中  = 黄

残量小  = 赤

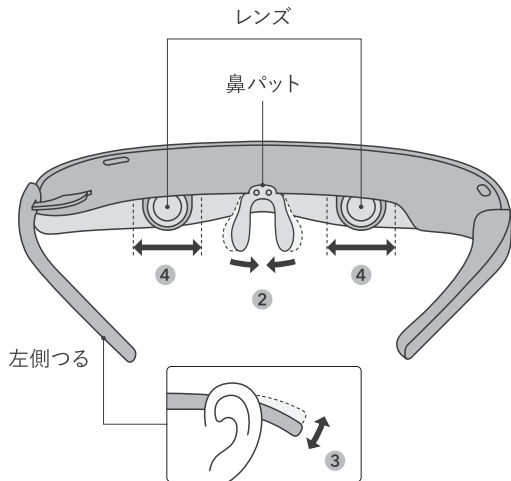

2 鼻パットの調整

ViXion01を装着し、かけ心地に合わせて鼻パットのサイズを選びます。さらに調整が必要な場合は、鼻パットの両端を指でつまみ、優しく折り曲げて幅を調整します。


3 左側つるの調整

装着した際、左右の高さのズレを感じる場合は、左側つるを指で優しく曲げて、ズレを調整して下さい。

4 レンズ位置の調整

レンズを指で左右にスライドし、見やすい位置に調整します。

初期設定

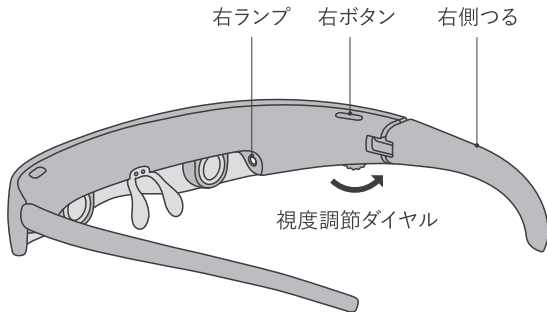

初期設定の状態は記憶され、次回からは設定不要です。

① 電源オン

右側つるを開くと、電源がオンになります。

② 右目の調整

左目を閉じ、右目のみで約2m以上離れた目標物を見ながら、視度調節ダイヤルを回して焦点を合わせます。

③ 左目の調整（左右の見え方が異なる場合のみ）

右目を閉じ、左目のみで②と同じ目標物を見ます。

左ボタンを 押しながら、視度調節ダイヤルを回して焦点を合わせます。焦点が合ったところで左ボタンを離すと設定が記憶され、オートフォーカスモードに切り替わります。以上で初期設定は完了です。

マニュアルモードについて

Vixion01には、自動で焦点を合わせる「オートフォーカスモード」と、手動で焦点を合わせる「マニュアルモード」があります。右ボタンを押すと、右ランプが青に点灯した後、「マニュアルモード」になります。再度右ボタンを押すと、右ランプが消灯した後、「オートフォーカスモード」に切り替わります。（出荷時はオートフォーカスモードが選択されています）

次のような場合は「マニュアルモード」に切り替えることで、見にくさを改善することができます。

- 窓越しに外の風景を見た際、外の風景ではなく窓付近に焦点が合う場合。
- 距離センサー*付近に帽子や髪の毛などの障害物が存在する場合。
- 裁縫針の穴に糸を通すなど、対象物が極端に小さい場合。
- 距離センサー*が感知しにくい場合。
- 鏡を見るときは必ず「マニュアルモード」で調整してください。

